

Helicobacter pylori Atemtest (13C- Harnstoffatemtest) **diabact® UBT 50**

Patientenvorbereitung

Der Atemtest gilt als zuverlässige Methode zum Nachweis einer Helicobacter pylori-Besiedelung der Magen- und Duodenalschleimhaut. Um »falsch« normale Ergebnisse zu verhindern, sollte mind. 1 Woche vor Testdurchführung die Einnahme von Protonenpumpenhemmern abgesetzt werden, sowie eine evtl. vorangegangene Eradikationstherapie oder sonstige Antibiotikabehandlung mindestens 4 Wochen zurückliegen. Der Patient sollte zur Durchführung des Testes nüchtern sein (mind. 4 Std.).

Testmaterial:

Zur Durchführung verwenden Sie ein Testkit mit folgendem Inhalt:

1 Strohhalm, 4 Röhrchen (2 Röhrchen für Atemluft »00 min« und 2 Röhrchen für Atemluft »10 min«), Diabact® UBT 50 mg Tablette, Durchführungsanweisung, Gebrauchsinformation des Herstellers und Bestellformular.

Testdurchführung:

Hinweis: Manche Patienten atmen nach dem Ausatmen versehentlich vor dem Herausziehen des Strohhalms kurz wieder ein. Dies kann zu falsch negativen Ergebnissen führen.

1. Alle Röhrchen beschriften: Name des Patienten oder Barcode, Entnahmedatum und Zeitpunkt.
2. Beide Röhrchen mit der Beschriftung »00 min« entstöpseln.
3. Mit der Spitze des Strohhalms bis zum Boden des 1. Röhrchens gehen.
4. Kräftig einatmen und die Ausatemluft vollständig durch den Strohhalm in das Röhrchen blasen. Stopfen sofort auf das Röhrchen setzen.
6. Wiederholen Sie das Gleiche mit dem zweiten, mit »00 min.« beschrifteten Röhrchen.
7. Eine Tablette diabact® UBT 50 mit einem Glas Wasser einnehmen.
8. Nach 10 Minuten beide Röhrchen mit der Beschriftung »10 min« entstöpseln.
9. Wieder mit der Spitze des Strohhalms bis zum Boden des Röhrchens gehen.
10. Kräftig einatmen und die Ausatemluft vollständig durch den Strohhalm in das Röhrchen blasen. Stopfen sofort auf das Röhrchen setzen.
11. Wiederholen Sie das Gleiche mit dem zweiten, mit »10 min.« beschrifteten Röhrchen.



Abrechnung der Testdurchführung:

GOÄ Ziffer A615 Euro 23,81 (1,8facher Satz)

EBM Ziffer 02400 65 Punkte für Fachärzte, bei Hausärzten in der Vers.-Pauschale enthalten

EBM Ziffer 40154 Kostenerstattung 25,60 Euro

Materialkosten siehe Bestellformular der GLP medical.